


Notice technique d'utilisation du FRED PA-1

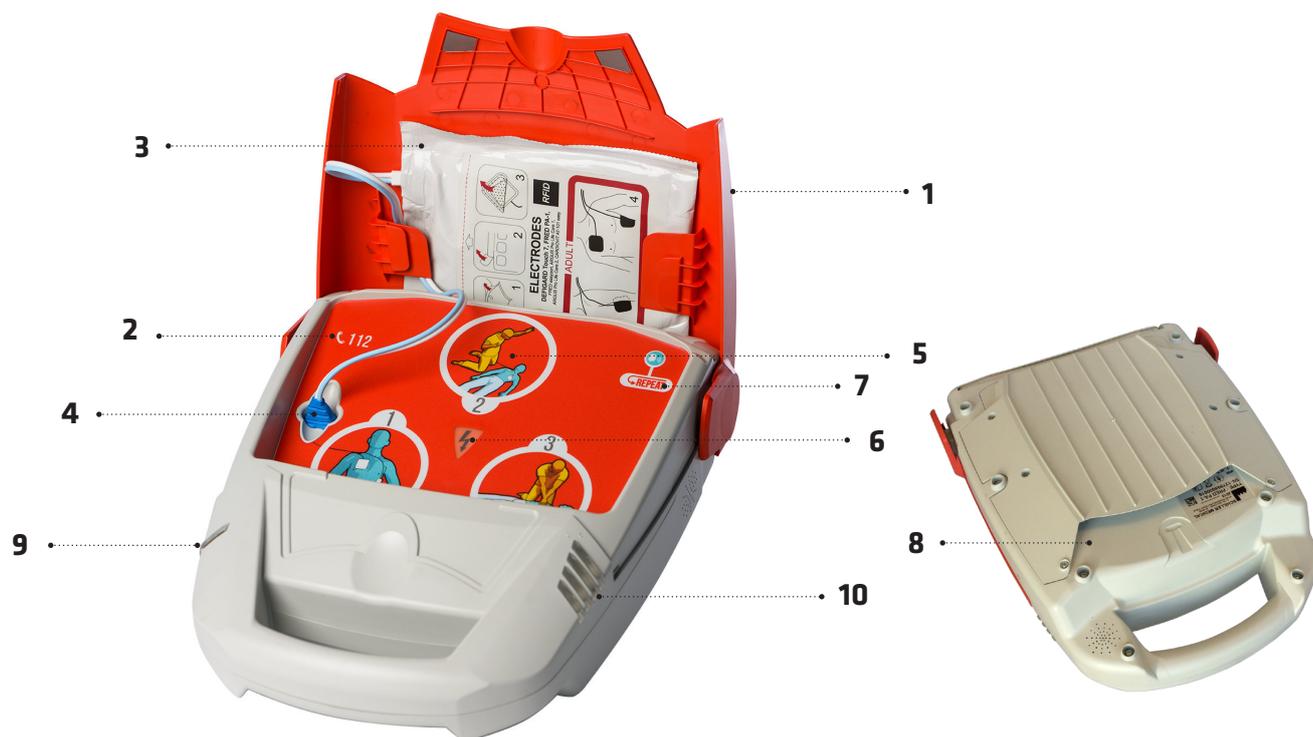

1. Ouvrir le capot pour la mise en marche automatique du DEA (Défibrillateur Entièrement Automatique) FRED PA-1
2. Indication du numéro d'urgence à composer (112)
3. Electrodes de défibrillations pré-connectées
4. Connecteur du câble des électrodes pré-connectées (avec Tag RFID)
5. Pictogrammes explicatifs avec diodes indiquant l'étape de réanimation
6. Indicateur lumineux de délivrance du choc électrique
7. Bouton permettant de répéter les messages vocaux
8. Emplacement pour la deuxième paire d'électrodes
9. Indicateur lumineux du bon fonctionnement de l'appareil (clignote en vert)
10. Diodes informant de l'état de l'appareil (voir encadré ci-dessous) :

- a. Activité du modem
- b. Remplacer la pile lithium
- c. Maintenance requise
- d. Remplacer les électrodes



Chaîne de survie

La victime ne respire pas

1. Appeler les secours en composant le **15**, le **18** ou le **112**
2. Ouvrir le capot de l'appareil pour le mettre en route et suivre les indications
3. Ouvrir le sachet d'électrodes, les coller sur la poitrine de la victime (comme indiqué sur le dessin) et brancher le connecteur dans le DEA (si nécessaire)

Continuer de suivre les instructions vocales (ou visuelles) du défibrillateur

Le choc électrique ne sera proposé que si l'appareil l'autorise : Dans ce cas, le DEA réalise un décompte de 3 secondes et délivre le choc automatiquement.

4. Continuer à suivre les instructions du défibrillateur jusqu'à l'arrivée des secours



Service Client

serviceclient@schillerfrance.fr

0 820 20 22 25 Service 0,09 € / min
+ prix appel



SCHILLER
FRANCE S.A.S